



NOUVEAU



L'HIPPOSANDALE ÉLÉGANTE ET MODERNE



LA NOUVELLE **Trek Pro**

Maintenant disponible chez Eurofers


POUCES

CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



RESPIRANT, SOUPLE ET LÉGER

- L'hipposandale améliorée Trek Pro assure une protection optimale même sur les terrains les plus accidentés.
- Disponible dans les tailles : 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

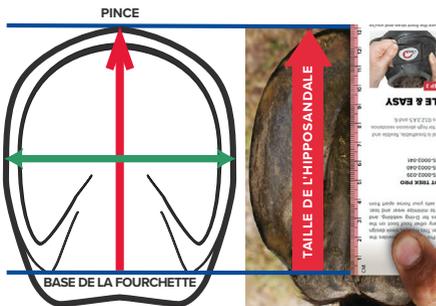

EXCLURE LES GLOMES DE LA MESURE

CONCEPTION OPTIMISÉE

La conception améliorée de cette hipposandale se caractérise par un extérieur en TPU Pro Mesh exclusif et par une semelle entièrement moulée unique avec système de drainage de l'eau. La présence de renforts moulés au niveau des languettes et velcros aide à prévenir de l'usure normale et permet un ajustement optimal. Son look élégant mettra votre cheval en valeur.

HIPPOSANDALE CAVALLO TREK PRO

0 : 745-0002-035 4 : 745-0002-039

1 : 745-0002-036 5 : 745-0002-040

2 : 745-0002-037 6 : 745-0002-041

3 : 745-0002-038

- Le polyuréthane thermoplastique Pro Mesh est respirant, souple, léger. Il est conçu pour être durable.
- Son attache centrale permet son utilisation indifféremment pour le sabot gauche ou pour le sabot droit.

SIMPLE A MESURER

Les mesures de chaque sabot doivent être prises après un nouveau parage. Pour la longueur, il faut mesurer la distance de la pince à la base de la fourchette. Pour la largeur, la mesure doit être prise à l'endroit le plus large du sabot.

Taille	Taille KH	CM	Pouces
0	3x0	102 - 109	4" - 4 1/4"
1	00	110 - 117	4 5/16" - 4 9/16"
2	0	118 - 125	4 5/8" - 4 7/8"
3	1	126- 133	4 15/16" - 5 3/16"
4	2	134- 141	5 1/4" - 5 1/2"
5	3	142- 149	5 9/16" - 5 13/16"
6	4	150- 157	5 7/8" - 6 1/8"

MISE EN PLACE SIMPLE ET FACILE



Centrer le sabot dans la sandale et appuyer la languette fermement sur la pince.



Rabattre fermement les parties latérales vers l'avant et vérifier qu'elles sont de niveau.



Fixer le velcro avant et le cheval est prêt à travailler.

Maintenant disponible chez Eurofers